

# POIC<sup>®</sup>バイオスケーラー

## 【L-アスコルビン酸での洗浄方法(タンク用)】

フッ素チューブを使用しているため耐久性はありますが、  
本体のメンテナンスをしていただくことによって、機器がもっと長持ちします。

- ① L-アスコルビン酸を 1 リットルの水道水に1g 入れて溶かします。  
(コーヒーマドラー Spoon 1 匙ほど)
- ② 1 回目洗浄
  - ① の水をタンクに入れて、【水タンク注水】を選択し、注水量は【最大】にして LED ハンドピース先端から 20~30 秒水出しを行ってください。
- ③ 2 回目洗浄  
次はタンクに【精製水・RO 水】を入れて、同じ方法で水出しを行ってください。

★機器メンテナンスは★ ※L-アスコルビン酸は弊社にて販売しております。

株式会社エピオス 修理受付 TEL 0120-656-166 (フリーダイヤル)